

Hoe om te gaan met de elektrodes van de Zoll AED plus

We krijgen nog wel eens vragen hoe men met de afwijkende elektrodes van de Zoll AED plus het beste om kunnen gaan.

Hieronder beschrijven wij van HartslagNu.Leerdam de manier waarop je deze elektrodes op een slachtoffer dient aan te brengen.

Een extra voordeel van deze elektrodes is dat je de rechter electrode met +/- 12 cm kan verlengen zodat je bij een groot slachtoffer de electrode toch op de juiste plaats kan plakken.






Leg de AED boven het hoofd van het slachtoffer en zet hem aan




Scheur de verpakking van de elektroden open

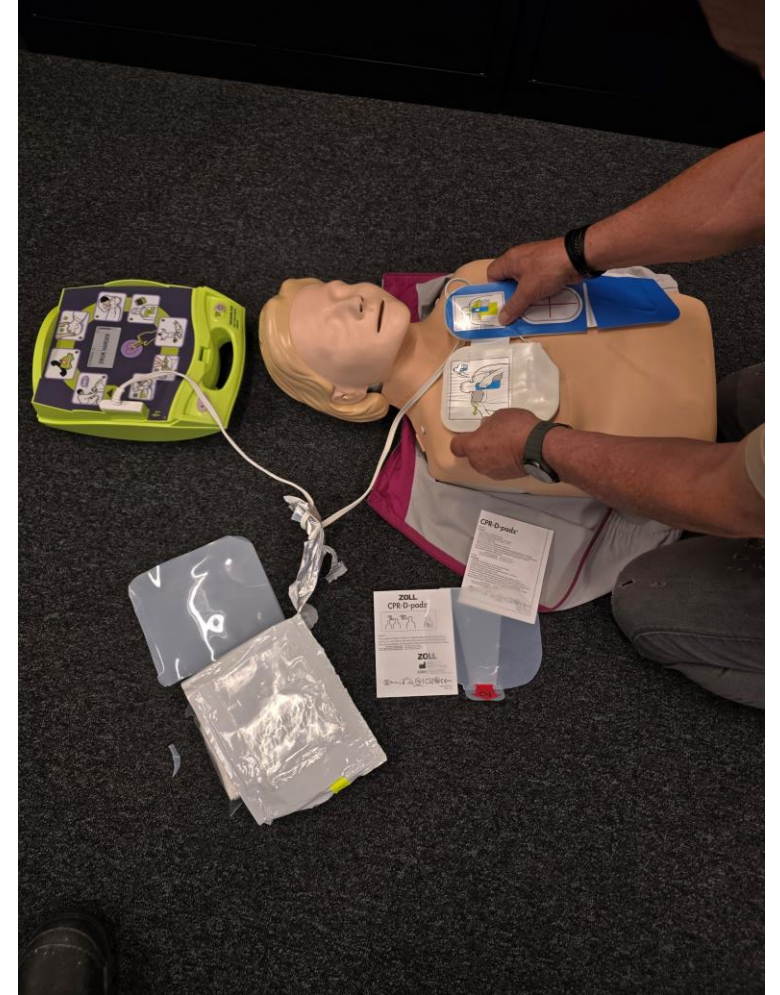

Leg de elektroden op het slachtoffer met het kruis midden op het borstbeen



Haal het plastic van de linkse electrode en plak deze op de aangegeven plek op het slachtoffer

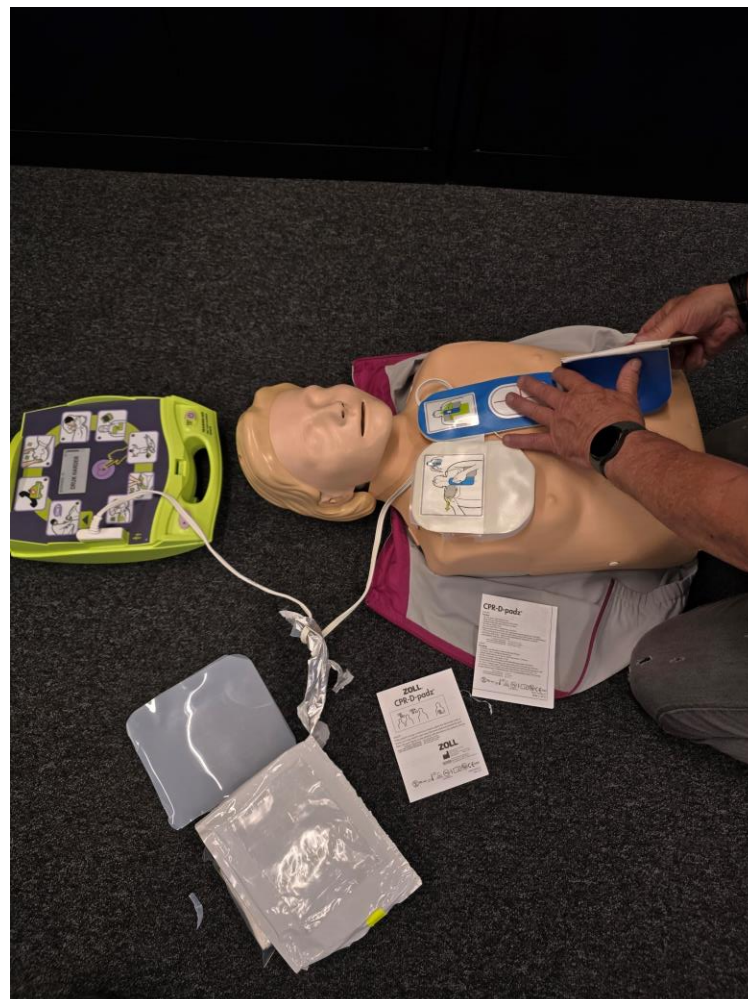


Haal het plastic van de rechter electrode en plak ook deze op de aangegeven plek



Als je er nu achter komt dat deze te kort is om dit te doen



Scheur de rechter electrode dan los van het blauwe middengedeelte

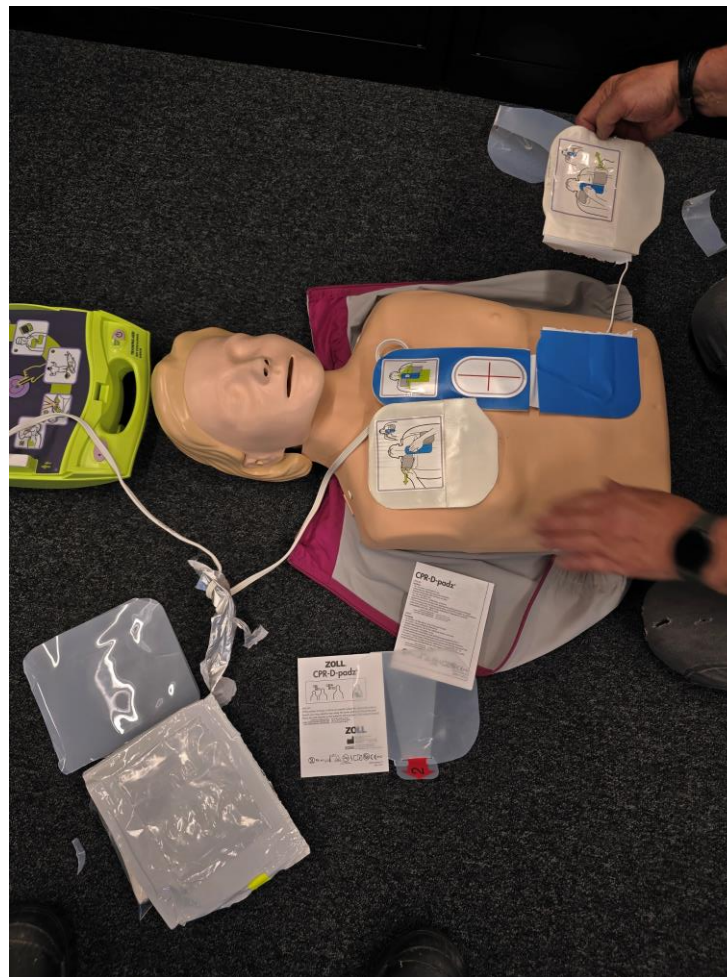

Nu komt er +/- 12 cm extra draad vrij



De electrode kan op de juiste plaats geplakt worden en kan de AED gaan analyseren

Bij gebruik van deze CPR-D padz krijg je vanuit de AED ondersteuning tijdens de reanimatie zoals:

- ❖ “Druk harder” als de compressies niet diep genoeg zijn
- ❖ “Goede compressies” wanneer je het goed doet
- ❖ Metronoom (piepjes) om het juiste tempo aan te houden